




Innovation
2012

Der Tetanus-Teststreifen

Für den Fassisi® TetaCheck-Teststreifen wird ein hochreines Tetanus-Toxoid zum Nachweis von Tetanus-Impf-Antikörpern verwendet. Durch den einzigartigen Doppel-Antigen-Sandwich-Testaufbau wird eine hohe Sensitivität und Spezifität erreicht. Dabei binden die Antikörper sowohl gold-markiertes Tetanus-Toxoid als auch unmarkiertes Tetanus-Toxoid auf der Testlinie des Teststreifens. Durch diese Doppelbindung des Antikörpers an die Toxoide wird nicht nur eine höhere Spezifität des Schnelltests erreicht, sondern es ist auch eine spezies-unabhängige Anwendung möglich.

Fassisi® TetaCheck


Die Tetanus-Antikörperkontrolle für ein Impfen mit Verstand

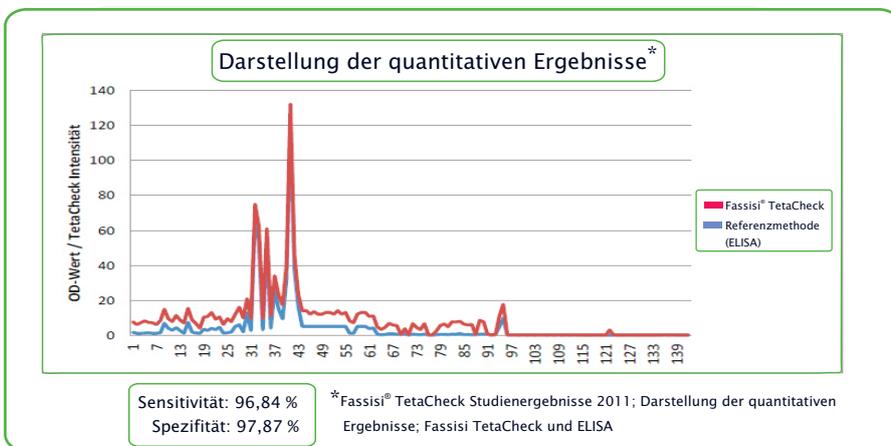

Fassisi® TetaCheck



Titerkontrolle kostengünstig, einfach vor Ort

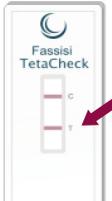

Eine starke Testlinie ist erkennbar, der Antikörper-Titer ist > 1 IE/ml. Das Pferd besitzt noch einen genügend hohen Antikörperschutz, eine Impfung ist aktuell nicht notwendig.



Eine schwache Testlinie ist sichtbar. Der Antikörpertiter liegt im Bereich $> 0,1$ und < 1 IE/ml. Das Pferd besitzt noch einen genügend hohen Antikörperschutz, aber eine Impfung sollte zeitnah stattfinden.

Hinweise für ein effizientes Impfmanagement

Bei Fohlen

Durch die aktive Kontrolle des Antikörpertiters bei Fohlen kann der optimale Impfzeitpunkt besser eingegrenzt werden. Eine zu frühe Impfung kann unter Umständen zu einem lebenslang mangelhaften Impfschutz führen.

Bei Klinikaufenthalt

Unnötige Impfungen bei Klinikaufhalten kann man mit der vorherigen Titerkontrolle umgehen, und eine zusätzliche Belastung bleibt dem Tier bei ausreichendem Impfschutz erspart.

Bei Routine-Impfungen

Ein Impfen ist notwendig und bietet den einzigen Schutz gegen den Wundstarrkrampf. Zu häufig vorgenommene Wiederholungsimpfungen sind ineffektiv, dienen nicht dem Schutz des Tieres und können zu einer Verminderung des Impfschutzes führen.

Für ein effizientes Impfmanagement ist die Kenntnis des Impfstatus der Tiere Voraussetzung. Mit Hilfe des Fassisi® TetaCheck kann die Konzentration der vorhandenen Antikörper zuverlässig innerhalb weniger Minuten nachgewiesen werden. Erstmals wird der Aufbau eines effizienten Impfmanagements möglich.

Produkt	Fassisi® TetaCheck	
Zum Nachweis von	Tetanus-Antikörper	
Packungsgrößen	5/10 Testkassetten	 <p>Clostridium tetani</p>
Lagerung	2-30 °C	
Probenmaterial	Vollblut, Serum, Plasma	
Tier	Pferd	

Ihre Vorteile durch den Einsatz der Fassisi® Schnelltestsysteme auf einen Blick

 <p>Schnelle, einfache Testdurchführung Einfache Handhabung Effektive Vor-Ort-Anwendung Testergebnisse in wenigen Minuten</p>	 <p>Höchste Qualitätsstandards Validierte Qualität Produziert nach GMP-Vorgaben Zertifiziert nach AMG und TierSG</p>
 <p>Problemlose Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur Lange Haltbarkeit Robuste Testkassetten</p>	 <p>Kompaktes Test Kit Praxisorientierte Kit-Gestaltung Kurzanleitung auf dem Kit Alle benötigten Komponenten enthalten</p>
 <p>Praxisorientierte Komponenten Innovative Testkomponenten Hygienische Testdurchführung Kein Kontakt zum Probenmaterial</p>	 <p>Kosteneffiziente Testsysteme Technologie für günstige Preise Zeitersparnis=Kostensparnis Verschiedene Packungsgrößen</p>